

Información importante

- No precisa ningún tipo de dieta antes de recoger la muestra.
- No realizar la prueba si presenta hemorroides sangrantes o menstruación hasta que no hayan pasado 3 días seguidos sin pérdidas de sangre.
- Tener el tubo fuera del alcance de los niños.
- Evitar que el líquido del tubo sea ingerido o contacte con los ojos o mucosas.
- Evitar la contaminación de las heces con orina.
- Recoger la muestra inmediatamente después de defecar.

496554 INSTRUCCIONES FOB



Procedimiento de recogida de heces para la determinación de sangre oculta

OC-SENSOR

Palex
Constant Improvement


INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE LA MUESTRA

1




Para evitar la caída de las heces en el agua, colocar una capa de papel higiénico en el sanitario y sentarse, si es posible, de cara a la cisterna. Si lo prefiere puede recoger las heces en una cuña u orinal.

2

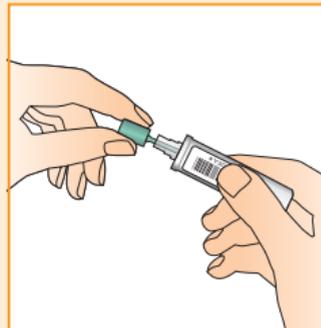


Desenroscar el tapón verde y extraer el bastoncillo.

3

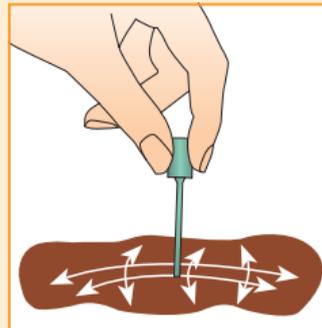

Introducir la varilla en las heces en distintos lugares y con distintos ángulos (6 veces). Solo picar, no cargar como una cuchara.

4

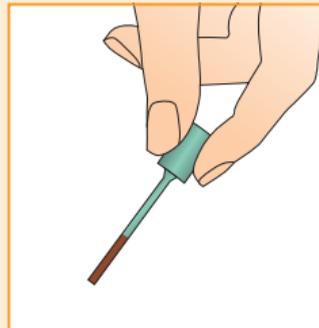


Es suficiente con poca cantidad de muestra.

5



Introducir el bastoncillo verde dentro del tubo, cerrarlo bien y agitar.

6

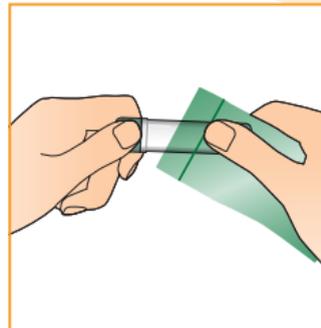

Guardar el tubo en la bolsa y conservarlo en la nevera. No tardar más de tres días en entrarlo en su centro de salud.